

# AUTOLIFT

HULPMIDDEL BIJ BADEN



nibotechnics

**De Autolift van Nibotechnics is een krachtig hulpmiddel bij baden dat een eenvoudige oplossing biedt voor de problemen die ouderen en personen met een beperking bij baden ondervinden.**

De Autolift is ontworpen door een ervaren team van ingenieurs dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen van efficiënte tilliften voor ouderen en personen met een beperking. Door gebruik te maken van kwaliteitsvolle materialen biedt de Autolift een jarenlange betrouwbare service in vochtige badkameromgevingen.

## HULPMIDDEL BIJ BADEN

Een Autolift bestaat uit drie basisonderdelen: een montageplaat die op de vloer naast het bad is bevestigd, een mechanisch bediende liftkolom met arm en een comfortabele, gevormde stoel.

Zowel de manuele als de elektrische versie van de Autolift kan geïnstalleerd worden aan de zijkant of aan het uiteinde van het bad. Diverse tilarmen maken de Autolift geschikt voor bijna elke badkamer.

De Autolift kan worden gebruikt met een vaste stoel of een afneembare stoel met een verrijdbaar onderstel.



## MANUEEL OF ELEKTRISCH

Om de Autolift zachtjes over de badrand te draaien, ontgrendel de hefboom. Het slot schakelt automatisch opnieuw in wanneer de stoel juist is gepositioneerd.

Door aan de draaihendel bovenaan de manuele liftkolom te draaien, zakt de persoon in het water voor een ontspannend bad. Bij de elektrische Autolift wordt de handset gebruikt. Wanneer het baden is voltooid, draai de procedure om om uit het bad te komen.



## GEASSISTEERD

Een extra verrijdbaar onderstel zorgt ervoor dat de verzorger de cliënt naar het bad kan vervoeren. De stoel kan daar aan de Autolift worden vastgehaakt en het onderstel wordt weggenomen. De stoel kan ook als douchestoel gebruikt worden.

Het onderstel en de uitneembare stoel zorgen dat de cliënt gemakkelijk naar het bad kan worden verplaatst. Til de stoel een stukje op van de vloer, nadat de stoel veilig aan de Autolift is bevestigd. Het onderstel kan nu gemakkelijk worden verwijderd. Laat de stoel van de Autolift in het water zakken, zodat de cliënt kan genieten van een ontspannend bad. Herhaal de procedure na het baden in omgekeerde volgorde.



## ALTERNATIEVE STOELN

Een stoel met toiletopening is verkrijgbaar. De toiletvoorziening bevordert ook het comfort bij het wassen. Een uitschuifbare beensteun kan worden bijgeleverd om baders te helpen die baat hebben bij het ondersteunen van de benen bij de transfer over de badrand.



## ANDERE ACCESSOIRES



Een toiletzitting kan worden uitgerust met een bedpan en bedpan houder..




Een uitschuifbare beensteun kan worden bijgeleverd. Dit accessoire is alleen beschikbaar bij een kuip- of toiletzitting met verrijdbaar onderstel.



Een vaste kuipzitting kan worden uitgerust met een hoofdsteen.



De biocompatibele veiligheidsgordel kan worden toegevoegd voor de veiligheid van de patiënt.

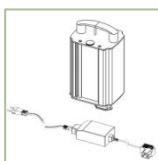

De elektrische Autolift kan worden uitgerust met een extra afneembare batterij of lader.

### **Nibotechnics nv**

Heikant 5 | 3930 Hamont-Achel | Belgium

T +32 (11) 80 20 40 | [info@nibotechnics.com](mailto:info@nibotechnics.com) | [www.nibotechnics.com](http://www.nibotechnics.com)